

QuickStart

1 Minimalna konfiguracja

Urządzenie łączy się z komputerem o co najmniej następujących parametrach:

- Windows 8, 10 lub 11 lub MacOS
- Intel Core i3
- 4 GB RAM
- Zalecana rozdzielczość: co najmniej 1366*768
- Aby korzystać z akcesoriów Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy lub Perifit), potrzebny jest komputer z systemem **Windows 10 lub 11** wyposażony w kartę Bluetooth lub MacOS

2 Wymagania dotyczące oprogramowania


Na komputerze musi być zainstalowane następujące oprogramowanie:

- Java 8 w wersji 64-bitowej (<https://www.java.com/fr/download/>)
- Sterownik FTDI (instalacja poprzez CDM212xxx_Setup.exe dostarczony z oprogramowaniem)
- Foxit PDF Reader

Jeśli nie ma ich jeszcze na komputerze, pliki instalacyjne są dostępne na kluczu w katalogu "drivers".

3 Instalacja

Zainstaluj program na pulpicie, klikając dwukrotnie narzędzie **instalacyjne** (lub **installation.cmd**) w katalogu głównym klucza.

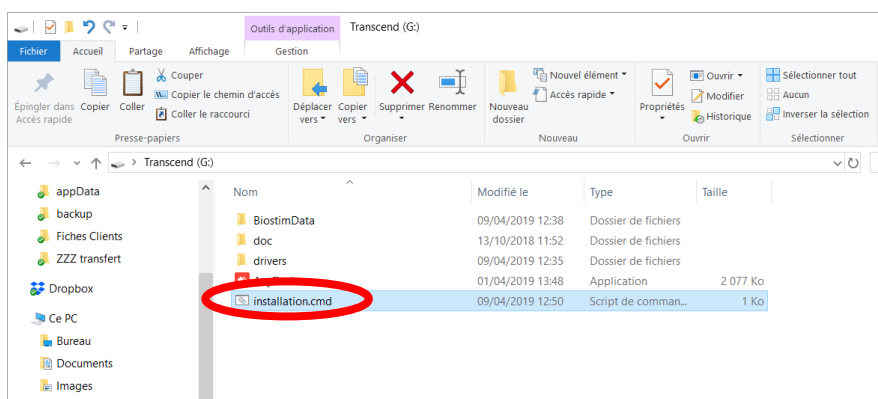

Ta operacja tworzy folder BiostimData w katalogu użytkownika (który będzie zawierał wszystkie dane pacjenta), a także skrót na pulpicie.

Procedura instalacji dla komputerów Mac jest specyficzna. Można ją znaleźć na stronie mazetsante.fr, na stronie pomocy technicznej.

4 Start

Ustaw przełącznik ON/OFF z tyłu urządzenia w pozycji ON "1".

Sprawdź, czy świeci się zielona lampka wskaźnika zasilania z przodu urządzenia.

Uruchom program Biostim na komputerze



5 Kontrola połączenia

Sprawdź, czy połączenie zostało nawiązane: zielony przycisk Home.

Czerwony przycisk Home oznacza problem z komunikacją między komputerem a urządzeniem. W takim przypadku należy sprawdzić następujące punkty:

- Moduł jest zasilany, a zielona dioda LED na panelu przednim świeci się.
- Kabel USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia i komputera.
- Sterownik FTDI zainstalowany poprawnie (CDM212xxx_Setup.exe)




Pomarańczowy przycisk Home wskazuje na problem z żarówką zatrzymania awaryjnego:


- Sprawdź, czy żarówka wyłącznika awaryjnego jest podłączona
- Jeśli wyłącznik awaryjny został aktywowany, biostymulator musi zostać ponownie uruchomiony (włącznik/wyłącznik z tyłu urządzenia).

6 W przypadku wystąpienia problemu

Przejdź do zakładki Wsparcie na stronie Konfiguracja i postępuj zgodnie ze wskazówkami zaznaczonymi na czerwono.

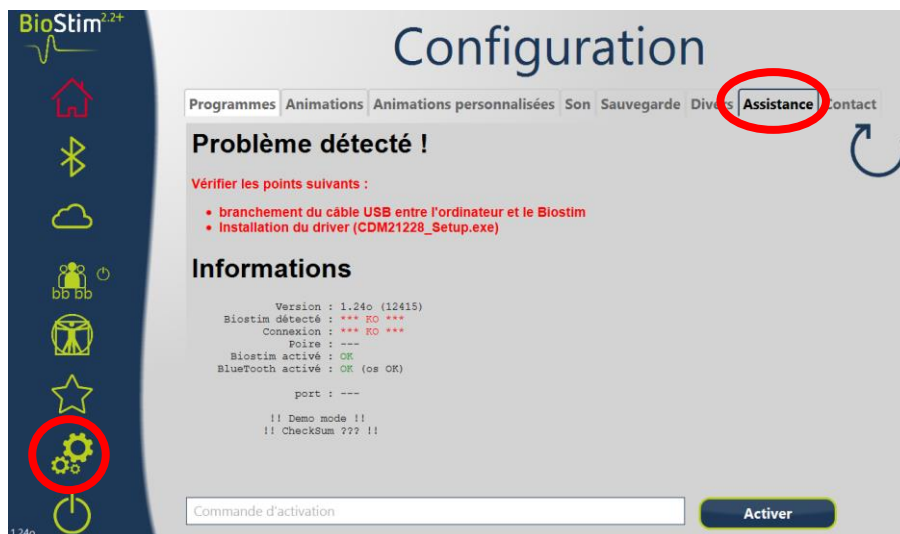

Jeśli to nie wystarczy, przejdź do zakładki Kontakt, gdzie możesz zgłosić problemy lub sugestie przez e-mail.

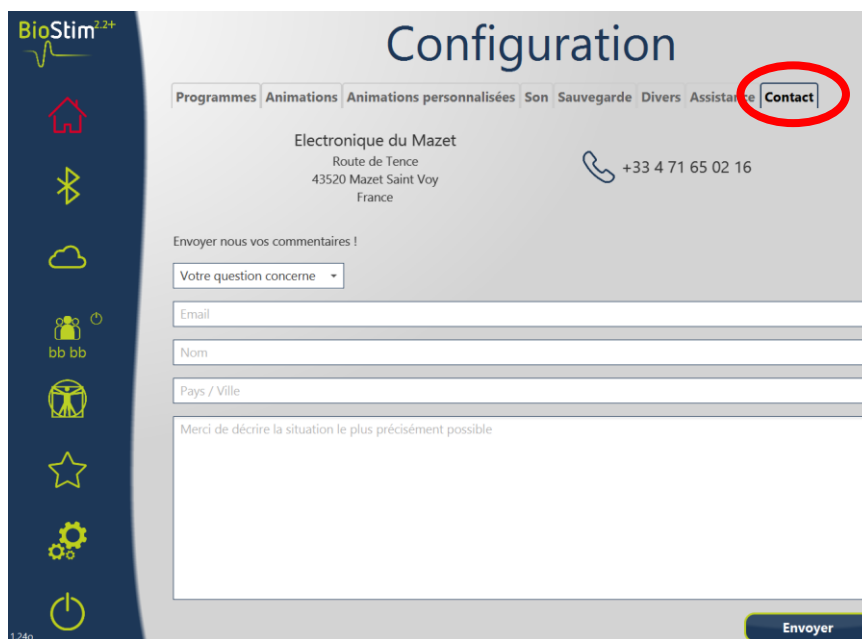

7 Pilot zdalnego sterowania

Podczas instalacji na komputerze zainstalowano oprogramowanie AnyDesk. Umożliwia ono zdalne sterowanie komputerem w celu zarządzania serwisem posprzedażowym.

Skrót jest dostępny na pulpicie



Aby upoważnić technika do przejęcia kontroli, należy podać mu login i hasło, które pojawiają się w oknie po uruchomieniu oprogramowania.

