

Snabbstart

1 Minimal konfiguration

Enheten ansluts till en dator med minst följande egenskaper:

- Windows 8, 10 eller 11, eller MacOS
- Intel Core i3
- 4 GB RAM-MINNE
- Rekommenderad upplösning: minst 1366*768
- För att använda ett Bluetooth-tillbehör (Blueback, BioMoov, Emy eller Perifit) behöver du en dator med **Windows 10 eller 11 som** är utrustad med ett Bluetooth-kort, eller MacOS

2 Krav på programvara


Följande programvara måste vara installerad på din dator:

- Java 8 64-bitarsversion (<https://www.java.com/fr/download/>)
- FTDI-drivrutin (installation via CDM212xxx_Setup.exe som medföljer programvaran)
- Foxit PDF-läsare

Om de inte redan finns på datorn finns installationsfilerna tillgängliga på nyckeln i katalogen "drivers".

3 Installation

Installera programmet på skrivbordet genom att dubbelklicka på installationsverktyget (eller **installation.cmd**) i roten av nyckeln.

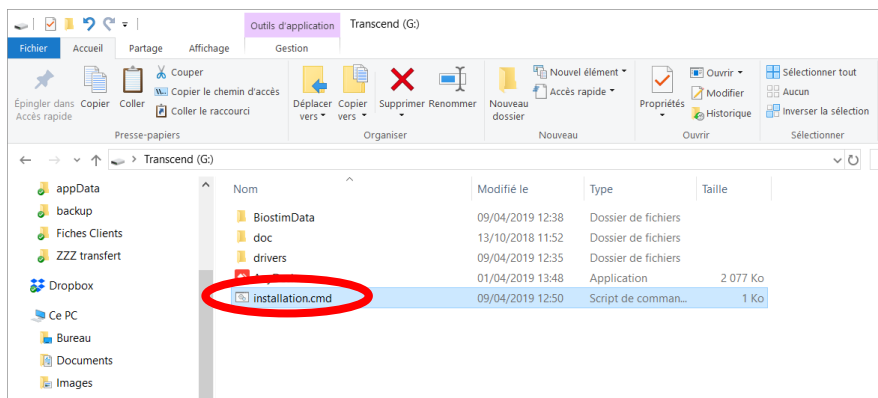

Denna åtgärd skapar en BiostimData-mapp i användarkatalogen (som kommer att innehålla alla patientdata), samt en genväg på skrivbordet.

Installationsförfarandet för en Mac är specifikt. Den finns på webbplatsen mazetsante.fr, på supportsidan.

4 Start

Ställ ON/OFF-omkopplaren på apparatens baksida i läge ON "1".
Kontrollera att den gröna strömindikatorylampan på enhetens framsida är tänd.

Kör Biostim-programmet på PC:n



5 Kontroll av anslutning

Kontrollera att anslutningen är upprättad: grön hemknapp.

Den **roda** hemknappen indikerar ett kommunikationsproblem mellan datorn och enheten. I så fall ska du kontrollera följande punkter:

- Modulen är spänningssatt och den gröna LED-lampan på frontpanelen lyser.
- USB-kabeln är korrekt ansluten till både enheten och datorn.
- FTDI-drivrutin korrekt installerad (CDM212xxx_Setup.exe)




Den **orange** hemknappen indikerar ett problem med nödstoppslampan:


- Kontrollera att nödstoppslampan är ansluten
- Om nödstoppet har aktiverats måste biostim startas om (på/av-omkopplare på enhetens baksida).

6 I händelse av problem

Gå till fliken Support på sidan Configuration och följ de råd som visas i rött.

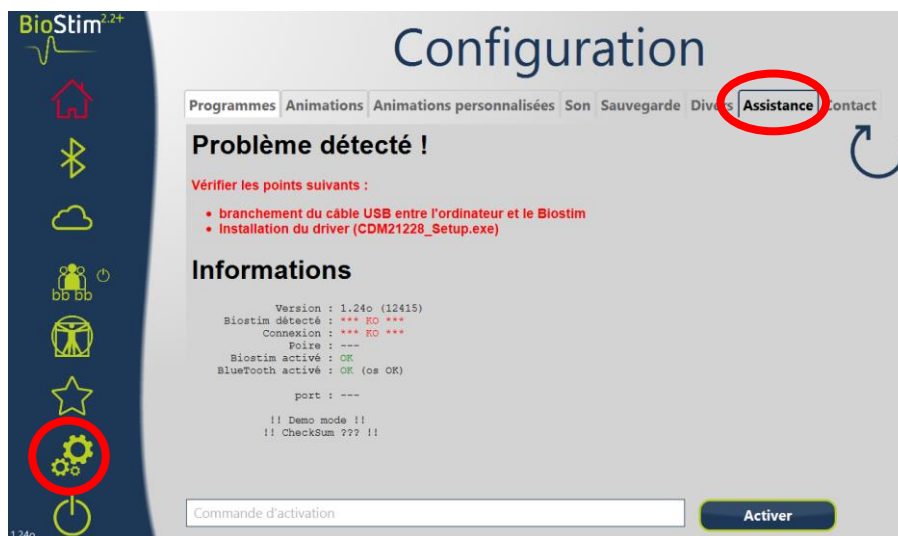

Om det inte räcker kan du gå till fliken Kontakt, där du kan rapportera problem eller lämna förslag via e-post.

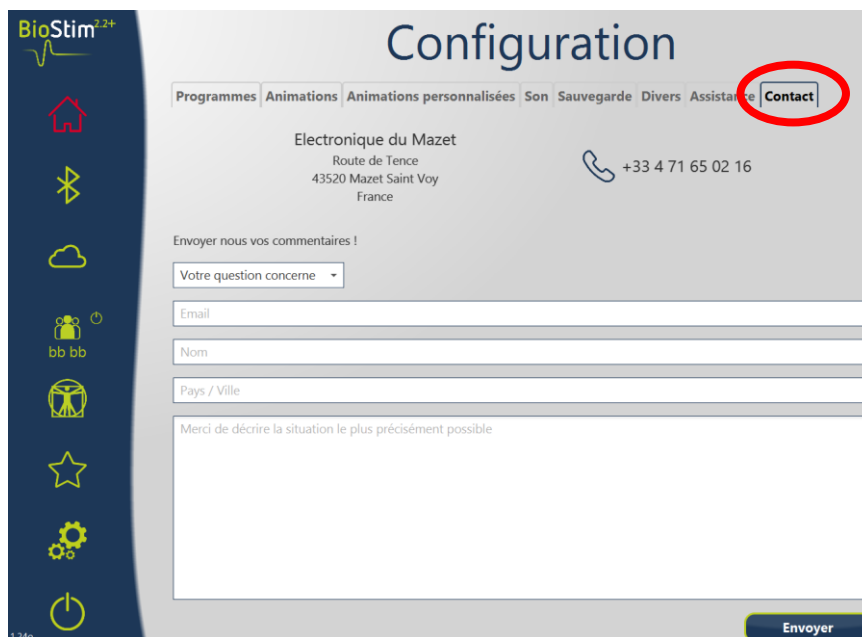

7 Fjärrkontroll

Under installationen installerades programvaran AnyDesk på datorn. Det gör att du kan ta fjärrkontroll över datorn för att hantera en eftermarknadstjänst.

En genväg finns tillgänglig på skrivbordet



AnyDesk.exe

För att en tekniker ska kunna ta över kontrollen måste du ge honom inloggningsuppgifterna och lösenordet som visas i fönstret när du har startat programmet.

