

## BioStim Version 1.18

Les nouveautés en images

### Toutes versions

#### Bilan périnéal

Création d'un nouveau programme bilan

➔ Chaque étape démarre en cliquant sur le titre de l'étape, ou sur la touche (Il est possible d'enchaîner les étapes sans pause ni clic, en décochant l'option « Pause entre les étapes des bilans » dans la page de configuration).



→ Les courbes sont analysées automatiquement par le logiciel, et complétées par des saisies manuelles (en particulier pour valider la présence d'un réflexe ou l'efficacité du verrouillage). L'ensemble des informations sont enregistrées dans la fiche patient :

## Suivi des séances

**Bilan Périnéal** ▶

### Bilans

Date	Max	Nb Rapides	Maintien	Toux	Effort	
24/08/20	126	4	2,1	Oui	Non	

### Bilan anorectal

Le bilan anorectal fonctionne dans le même esprit que le bilan périnéal. Une première étape permet de mesurer la pression du canal anal, suivi d'une aide au bon positionnement de la sonde

## Bilan Anorectal


**1. Mesure de la pression du canal anal**

Pression du canal anal : 124



**2. Fibres Rapides**

Contraction maximale : 123  
Nombre de contractions effectuées : 1

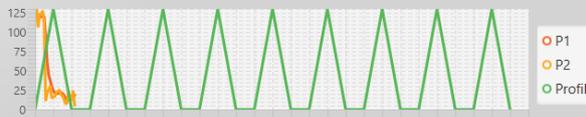

**3. Fibres Lentes**


Maintenir une contraction à 50% le plus longtemps possible



**4. Réflexe anal**

Le réflexe est-il présent ?  Volume

Volume rectal

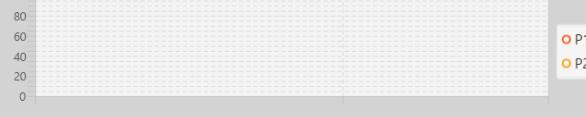

◀
□
▶
▶▶


### Nouvelle animation disponible : Racing

Une nouvelle animation est disponible, elle permet de conserver un environnement familier pour les patientes qui utilisent une sonde Perifit



### Nouvelle animation disponible : Perifit

Une nouvelle animation est disponible, elle permet de conserver un environnement familier pour les patientes qui utilisent une sonde Perifit

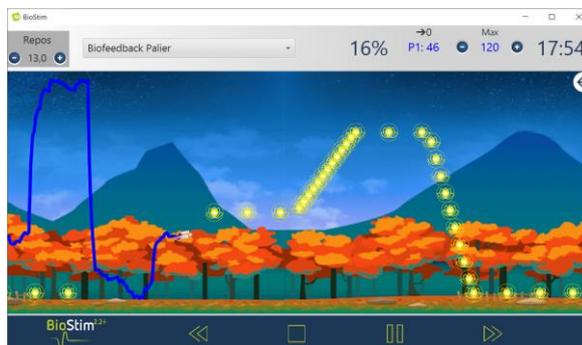

### Effacement des données enregistrées dans le cloud

- Il est possible d'effacer toutes les données enregistrées dans le cloud avec le mot clé d'activation « clear\_cloud.php »

### Correction de bugs

- Arrêt complet du programme lors du branchement de la connexion USB du Biostim (le problème apparaît après mise à jour Windows ou Antivirus) : mise à jour de la librairie USB.
- Si l'option « Afficher l'historique dans les animations » n'est pas cochée, certaines animations ne fonctionnaient pas.