

BioStim Version 1.19

Les nouveautés en images

Toutes versions

Page Patient

Ajout d'une image dans le tableau de suivi des séances, pour améliorer la lisibilité.

Pour effacer un programme, il faut désormais faire un clic droit sur son nom.

Durée	Max Stim	Max	Réussite	
08/07/21 : Bilan BFB Rapide 00:30		140	48 %	  
08/07/21 : BioFeedBack Explosion 2 00:26		140	53 %	  
08/07/21 : Biofeedback Palier 00:37		140	21 %	  

Ajout d'un nouveau modèle de document (lettre de consentement).

Formulaires

Suivi des séances

Bilans

Lettre de consentement.pdf 

- bilan anorectal.pdf
- bilan uro gyneco.pdf
- Lettre de consentement.pdf
- Lettre Medecin.pdf
- suiwi grossesse.xls
- Document Personnalisé...


Navigation

Il est désormais possible de renommer le nom des catégories en faisant un clic droit sur son nom. En remettant un nom vide, on retrouve le nom par défaut.




Des logos sont ajoutés à la gauche du nom des programmes afin de visualiser rapidement :

- Les programmes utilisateurs 
- Les bilans 
- Les programmes qui contiennent de la stimulation 





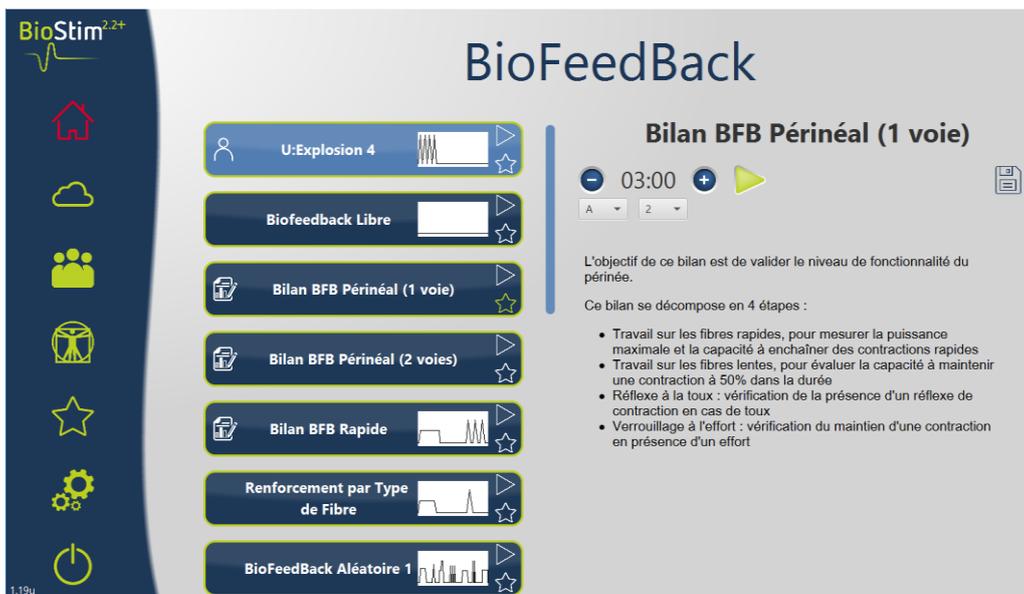


Il est possible de déplacer un programme utilisateur vers une autre catégorie en faisant un clic droit sur son nom.

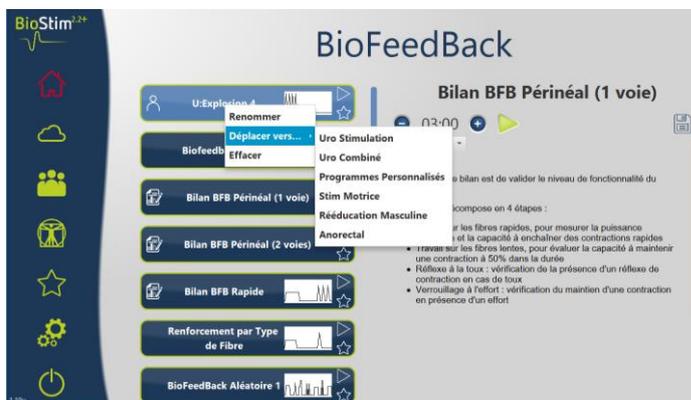


Animations


Ajout de nombreuses animations (et retour du lapin).

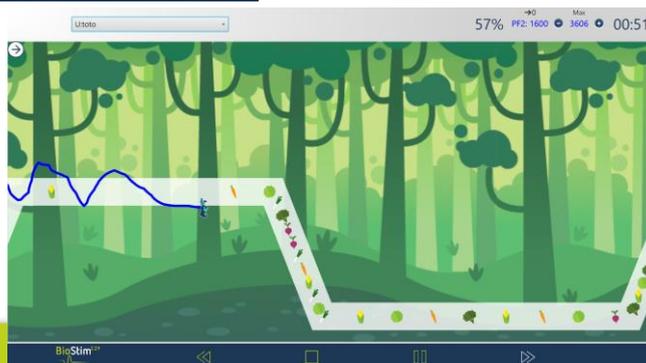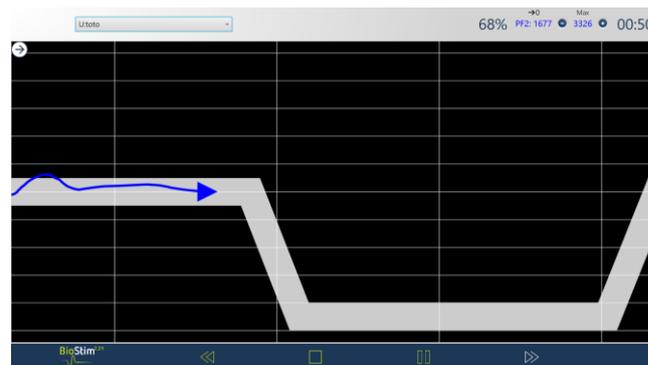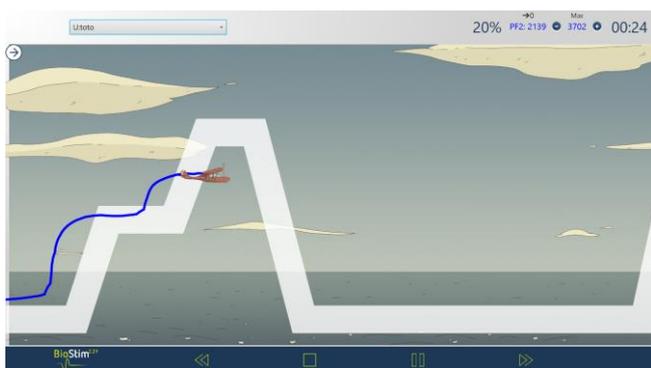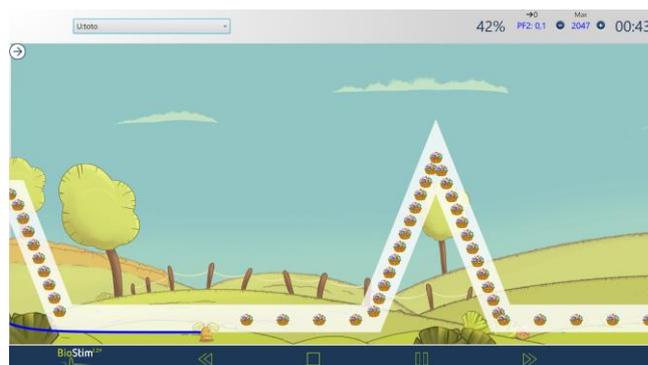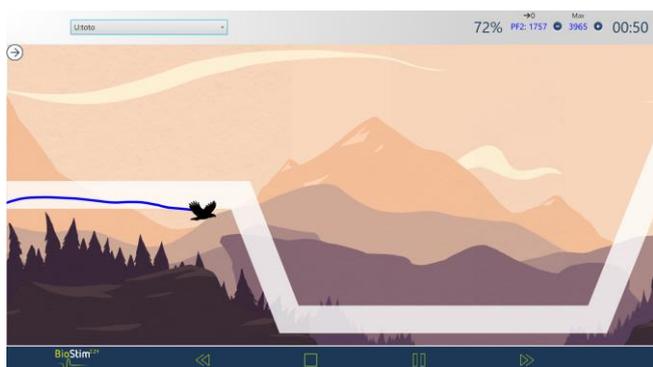

Ajout d'un mode réactif dans lequel on voit le profil apparaître au dernier moment.

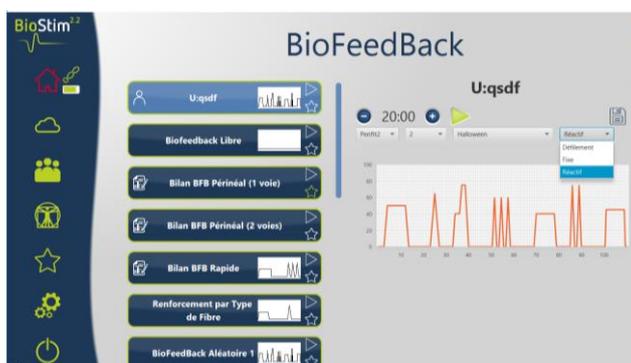

Afin de ne pas surcharger les menus déroulants, toutes ne sont pas activées par défaut. Il faut aller les sélectionner dans la page de configuration.

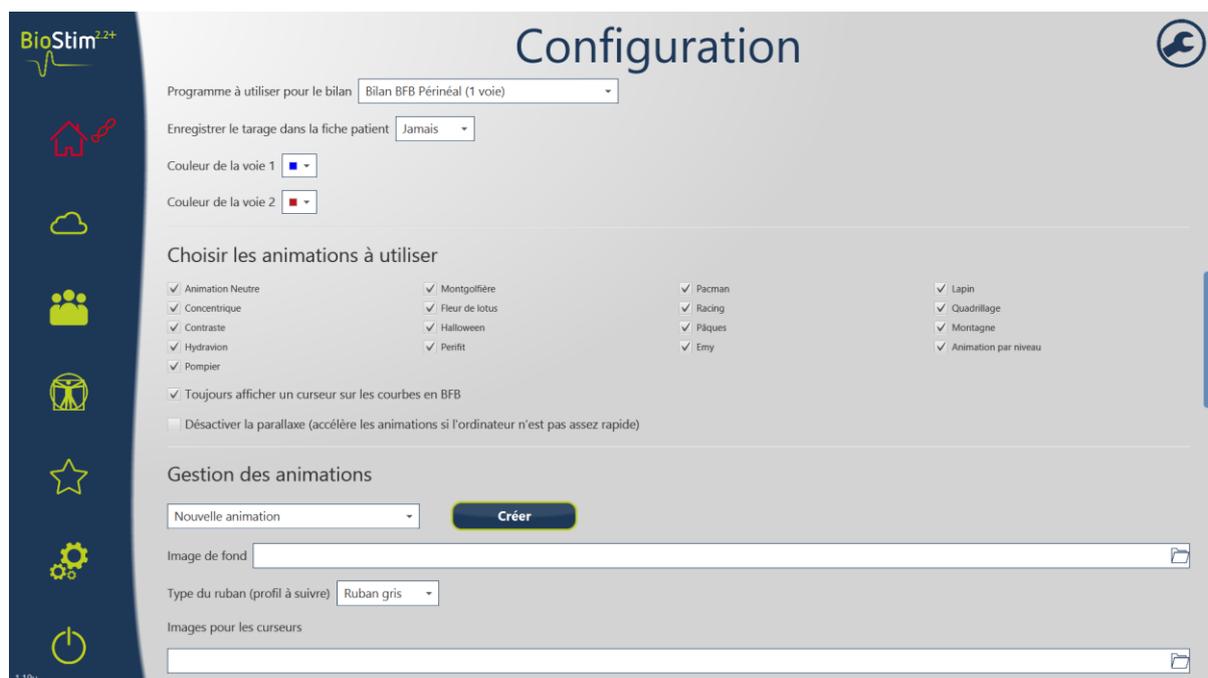

Remarques: certaines nouvelles animations utilisent un fond en plusieurs calques pour améliorer le rendu. Sur des PC entrée de gamme, cela peut ralentir l'animation. Pour éviter ce ralentissement, on peut désactiver cette fonction (option « Désactiver le paraxalle ») sous la liste des animations.

Programmes


Ajout d'un programme combiné « Fibres fatigables » qui alterne rapidement un Biofeedback plateau et de la stimulation à 50 Hz.

Modification du programme combiné « Incontinence d'effort » où le profil Biofeedback est désormais une succession de 3 pics au lieu d'un plateau.

Version +

Nouveau mode : Dessin Objets

Ajout d'un nouveau mode dans les programmes personnalisés qui permet de disposer des objets à l'écran sans définir de profil.

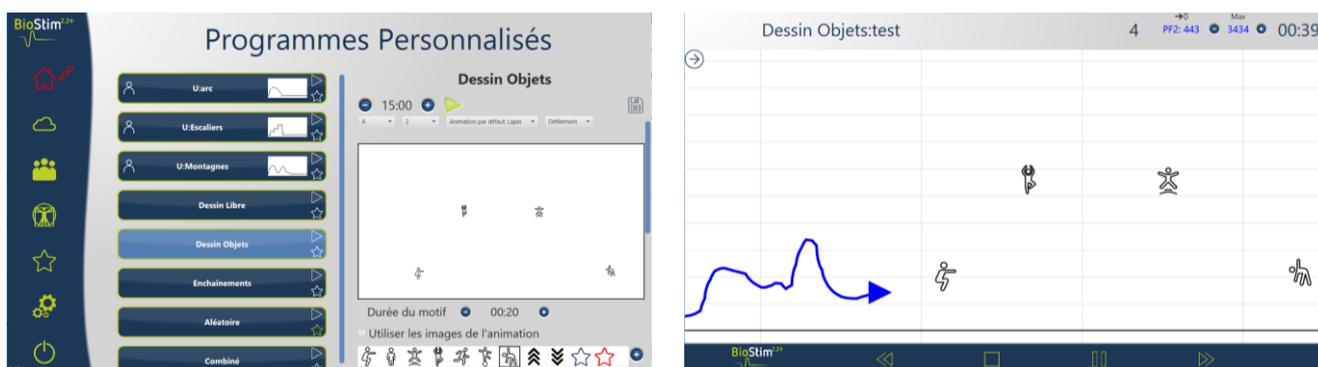

Le dessin s'effectue en sélectionnant l'image que l'on souhaite ajouter en cliquant dans la zone de dessin.

On peut ensuite déplacer ses objets en les glissant à l'aide de la souris ou les supprimer en cliquant dessus.

En sélectionnant l'option « utiliser les objets de l'animation », les objets ajoutés pendant l'exercice seront ceux liés à l'animation choisie.

Le bouton + à droite des icônes permet de rajouter des images personnalisées. Elles peuvent ensuite être supprimées par clic droit sur la vignette.

Impressions

Il est désormais possible de revoir, de comparer et d'imprimer les bilans.



Il est possible de choisir la zone à imprimer dans le mode revoir à l'aide du clic droit dans la zone de dessin.




Side Panel à gauche

Le Side Panel est désormais à gauche de l'écran afin de moins gêner la visualisation des programmes.

Ajout d'une deuxième voie de stimulation

Il est possible d'ajouter (ou d'enlever) une deuxième voie de stimulation à l'aide du bouton + en haut à droite du tableau de présentation du programme.

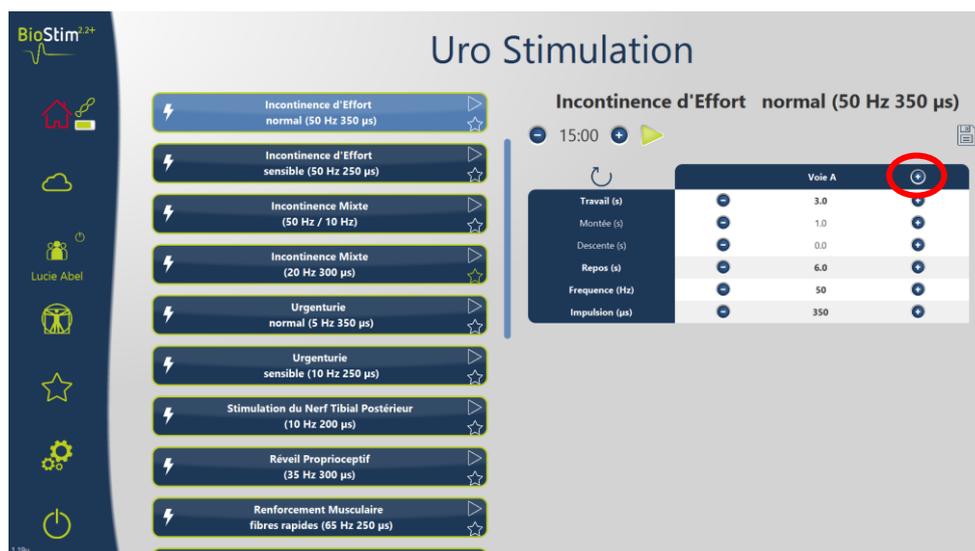

Divers

- Il est désormais impossible de lancer un programme si on n'est pas connecté au Biostim (maison rouge). Cette interdiction peut être contournée en utilisant le mot-clé « demo=1 » dans la page SAV.
- Par défaut, le tarage n'est plus enregistré dans la fiche patient (évite des incompréhensions si un tarage mal fait persiste pour les exercices suivants).
- Amélioration des messages d'erreur lors de la connexion avec une sonde BlueTooth pour faciliter la résolution du problème.
- Les commentaires multilignes sont maintenant affichés correctement dans le tableau de la page patient.
- Dans certaines situations, un décalage pouvait se produire en stimulation entre l'affichage à l'écran et les impulsions envoyées par l'appareil. Cela a été corrigé.
- Certains boutons étaient rognés ou mal alignés dans la page de présentation des programmes de stimulation. Cela a été corrigé.
- Après 30 jours d'utilisation, ajout d'un logo sur la page principale pour inciter les utilisateurs à donner leur avis sur l'appareil.
- Ajout du numéro de version en bas à gauche du menu pour faciliter le diagnostic à distance.