

BioStim Version 2025.1


Nouveau Design




Un nouveau design a été adopté afin d'améliorer la lisibilité des pages, et s'aligner sur les standards modernes de design

Enregistrement

L'enregistrement, qui devait jusqu'à présent se faire en ligne, est désormais directement accessible depuis le logiciel, pour plus de facilité, et une meilleure réponse aux exigences de traçabilité règlementaire

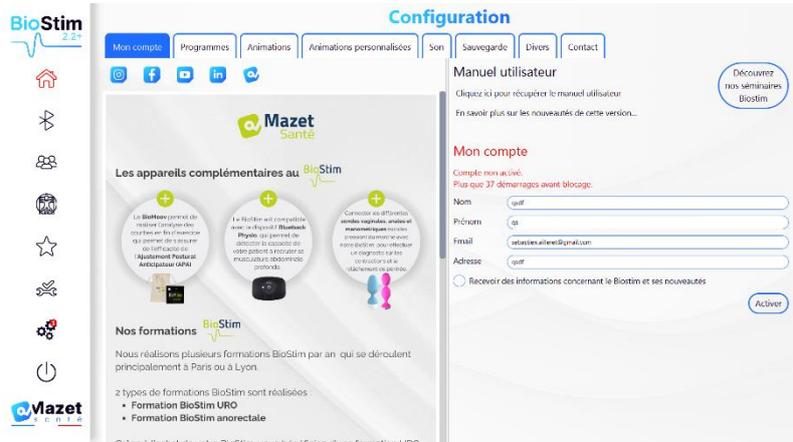

Autotest

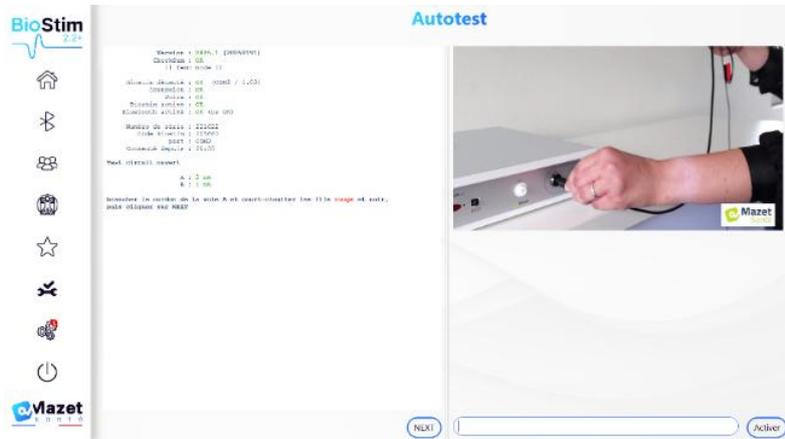

La page Cloud et l'onglet assistance de la page de configuration ont été remplacés par une page Autotest.

Comme précédemment, cette page permet de mettre à jour le logiciel quand des nouvelles versions sont disponible.

Elle permet également de faire un diagnostic complet de l'appareil, qui analyse aussi bien :

- Les problèmes de branchement
- Les erreurs d'installation
- Les câbles défectueux



Il est impératif de procéder à un autotest avant d'appeler notre SAV

Programmes « plateau d'équilibre »



Lorsqu'un Biomooov est connecté, une nouvelle catégorie de programmes « Plateau d'équilibre » est disponible. Ces programmes permettent de travailler sur l'équilibre sans nécessité d'avoir une voie de BFB EMG.

Elle contient des programmes des programmes cibles, où il faut attraper des objets sur une cible. On peut ajuster la durée nécessaire pour valider une cible

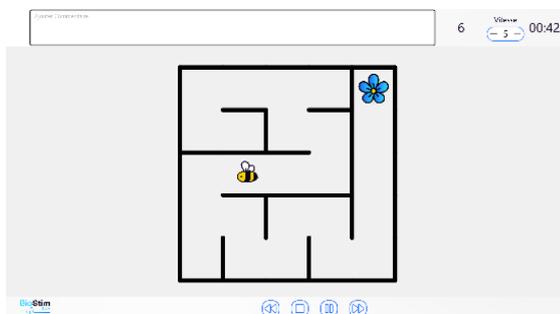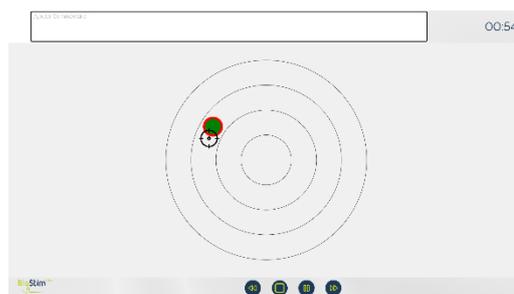

Des exercices de labyrinthe sont également disponibles, avec des tailles et des réactivités ajustables.

Nouveau Bilan suivant le protocole de Glazer



Nouveau bilan disponible, en suivant le protocole de Glazer. Plus d'informations sur ce protocole en suivant le lien :

<https://www.bfe.org/protocol/Protocol%20-%20Glazer%20PRPUI%20FINAL.pdf>


Aide à l'insertion des sondes anorectales



Dans tous les programmes anorectaux, il est possible de modifier le tarage pour qu'il intègre une phase d'aide à l'insertion de la sonde (comme ce qui existait déjà dans les bilans)

Page Patient

La page patient est désormais organisée en 2 onglets, pour améliorer la lisibilité en évitant de mettre trop d'informations dans une même page

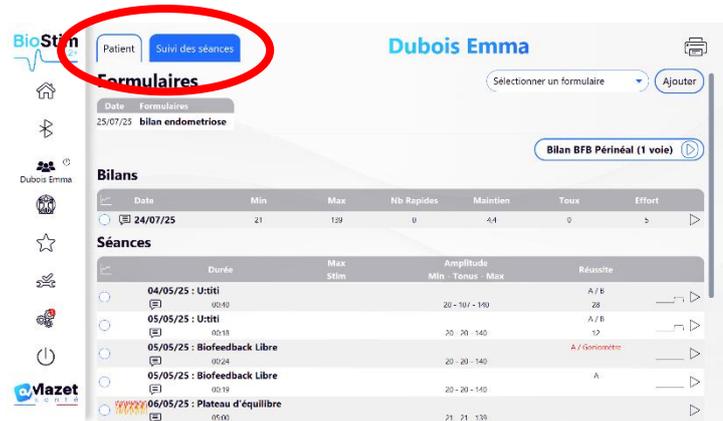


Nouveaux formulaires

Ajout de nouveaux bilans :

- Pédiatrique
- Endométriose.

Mise à jour du bilan uro-gynéco

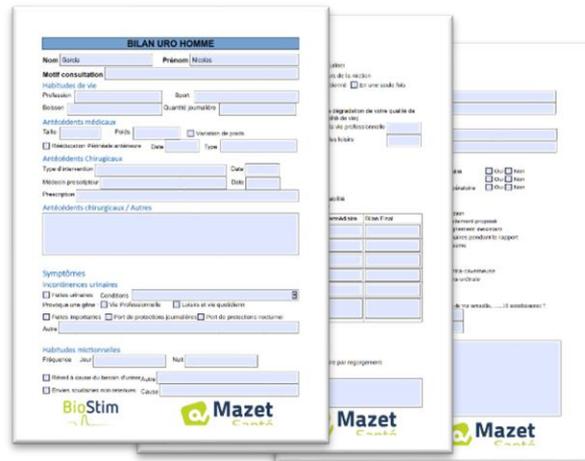

Page programme

Si un accessoire BlueTooth est connecté, il est automatiquement sélectionné comme voie par défaut.

Stimulation du Nerf Tibial Postérieur (10 Hz 200 us)


− 20:00 + ▶

ⓘ

	A	+
Travail (s)	5.0	+
Montée (s)	0.0	+
Descente (s)	0.0	+
Repos (s)	0.0	+
Frequence (Hz)	10	+
Impulsion (us)	200	+

Les descriptifs des programmes sont désormais disponibles en cliquant sur le bouton « i » en haut à droite de la page de description des programmes

Les enchaînements simples ont été revus. Les données sont présentées sous forme de tableau et non de liste pour améliorer la lisibilité

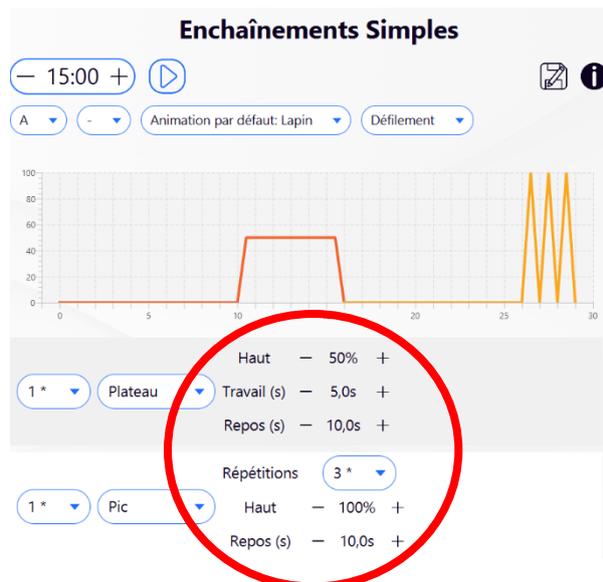

Divers et correction de bugs

- Retravail sur les pop-ups, pour éviter les problèmes d'écran bloqué quand plusieurs informations s'affichent en même temps
- La télécommande est désormais fonctionnelle pour ajuster le niveau de stim en BFB assisté
- Dans les enchaînements simples, si plusieurs pics de stimulation étaient enchaînés sans pause, certaines phases de stimulation étaient inactives