

BioStim Versione 2025.1


Nuovo design




È stato adottato un nuovo design per migliorare la leggibilità delle pagine e allinearle ai moderni standard di design.

Registrazione

La registrazione, che finora doveva essere effettuata online, è ora direttamente accessibile dal software, per una maggiore facilità d'uso e per soddisfare meglio i requisiti normativi di tracciabilità.

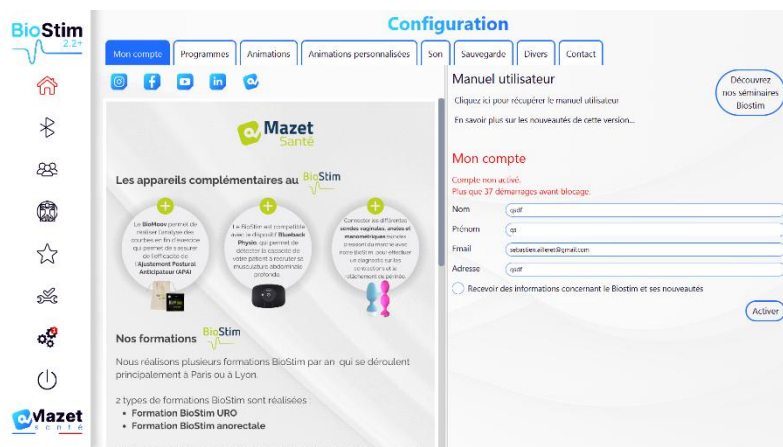

Autotest

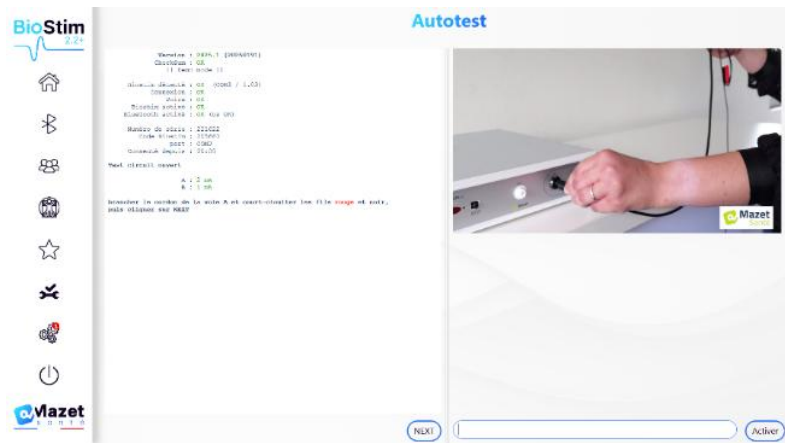

La pagina Cloud e la scheda di supporto nella pagina di configurazione sono state sostituite da una pagina di Autotest.


Come in precedenza, questa pagina consente di aggiornare il software quando sono disponibili nuove versioni.

Può anche essere utilizzata per eseguire una diagnostica completa del dispositivo, analizzando sia :

- Problemi di connessione
- errori di installazione
- Cavi difettosi



È indispensabile effettuare un autotest prima di rivolgersi al nostro servizio di assistenza.

Programmi "Balance Plate"

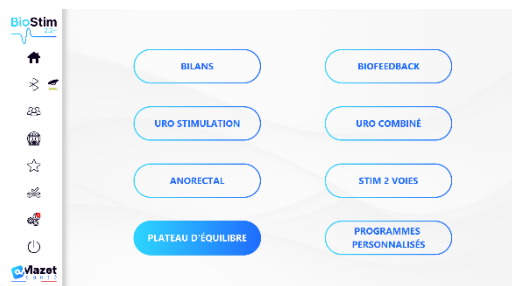

Quando si collega un Biomoov, è disponibile una nuova categoria di programmi "Balance Plate". Questi programmi consentono di lavorare sull'equilibrio senza bisogno di un canale BFB EMG.

Contiene programmi di bersaglio, in cui si devono prendere degli oggetti su un bersaglio. È possibile regolare il tempo necessario per raggiungere il bersaglio.

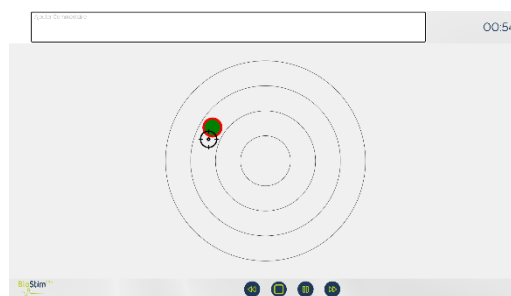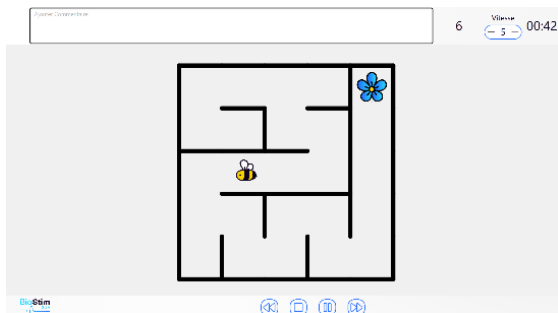

Sono disponibili anche esercizi di labirinto, con dimensioni e reattività regolabili.

Nuovo rapporto secondo il protocollo Glazer



È disponibile una nuova valutazione che segue il protocollo Glazer. Per ulteriori informazioni su questo protocollo, fare clic qui:

<https://www.bfe.org/protocol/Protocol%20-%20Glazer%20PRPUI%20FINAL.pdf>


Aiuto per l'inserimento delle sonde ano-rettali



In tutti i programmi anorettali è possibile modificare il taramento in modo da includere una fase di assistenza all'inserimento della sonda (come già avviene nelle valutazioni).

Pagina del paziente

La pagina del paziente è ora organizzata in 2 schede, per migliorare la leggibilità ed evitare di inserire troppe informazioni nella stessa pagina.

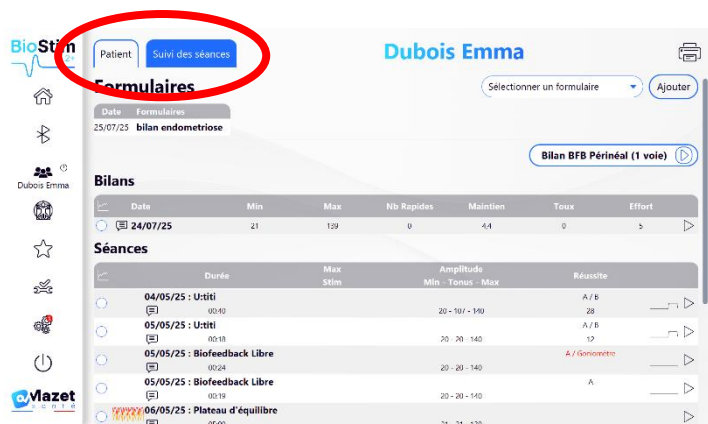


Pagina del programma

Se è collegato un accessorio BlueTooth, viene selezionato automaticamente come canale predefinito.



Le descrizioni dei programmi sono ora disponibili facendo clic sul pulsante "i" in alto a destra nella pagina di descrizione del programma.

Le sequenze semplici sono state riviste. I dati sono presentati sotto forma di tabella anziché di elenco per migliorare la leggibilità.

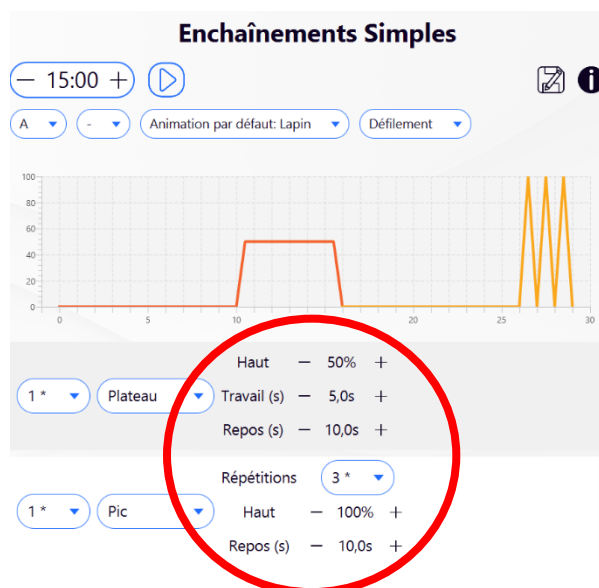

Varie e correzioni di bug

- I pop-up sono stati rielaborati per evitare che lo schermo si blocchi quando vengono visualizzate più informazioni contemporaneamente.
- Il telecomando è ora funzionale alla regolazione del livello di stimolazione nel BFB assistito.
- Nelle sequenze semplici, se diversi picchi di stimolazione erano collegati senza una pausa, alcune fasi di stimolazione risultavano inattive.