

BioStim Version 2025.2

BioPod




Cette nouvelle version est compatible avec le BioPod.

Le BioPod est un dispositif de biofeedback portable sans fil conçu pour la rééducation périnéale.

Plus d'informations :
<https://www.mazetsante.fr/biopod/>


Pour se connecter, cliquer sur le logo Bluetooth. Une fois connecté :

- Un logo BioPod apparaît à côté du logo Bluetooth
- Les voies Biopod apparaissent dans la liste des voies disponibles

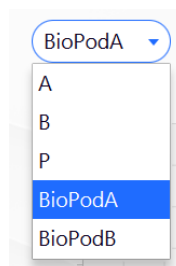


Choix du style

En allant dans le menu Configuration, onglet style, il est possible de choisir entre 3 styles proposés

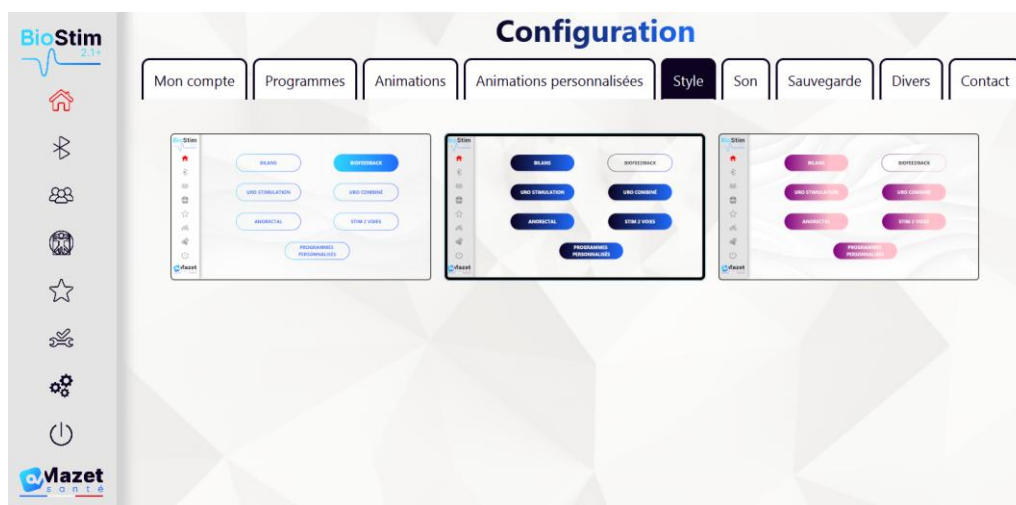

Mode superposition

A la fin d'un programme ou lors de la réouverture d'une courbe depuis la page « patient », un mode « superposition » a été ajouté au 2 modes existants (Complet et Moyenne)

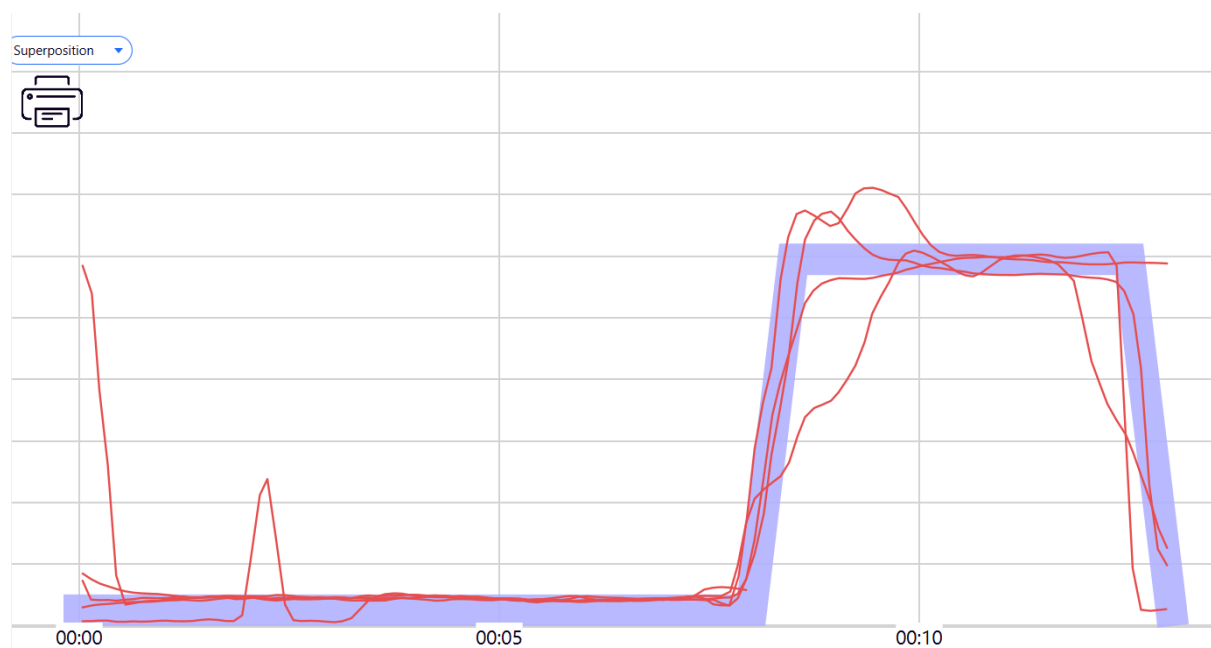

Courbe de tendance

La courbe de tendance, qui est visible dans la page « patient », ou en haut de la page BFB (si sélectionné) a été modifiée pour être plus cohérente. Elle présente les informations suivantes :

- La courbe rouge indique le niveau moyen de contraction pendant les périodes de travail
- La courbe orange indique le niveau moyen de contraction pendant la phase de repos.
- Chaque point correspond au passage d'un profil.

	12/09/25 : Biofeedback Libre	01:01	12 - 16 - 544	A / B	—	▷
	12/09/25 : Biofeedback Décontraction	06:07	9 - 154 - 302	A	—	▷
	12/09/25 : Biofeedback Décontraction	04:35	2 - 40 - 328	A / P2	—	▷
	12/09/25 : Biofeedback Libre 2 voies	03:37	4 - 3 - 39	P / P2	—	▷
	12/09/25 : Biofeedback Libre 2 voies	04:15	3 - 3 - 6	P / P2	—	▷
	12/09/25 : Biofeedback Libre 2 voies	04:42	1 - 16 - 732	A / P2	—	▷

Personnalisation des impressions

Dans la page de configuration, onglet divers, on peut choisir logo à ajouter dans les impressions pour les personnaliser. Ce logo sera inséré en haut à gauche.



Date	Min	Max	Nb Rapid es	Maint ien	Toux	Effort
07/10/25	0	9670	4	7,8	0	0

Date	Vitesse de contraction	Vitesse de relâchement
07/10/25	0,2s	0,3s

Divers et correction de bugs

- Une option dans la page de configuration, onglet « divers », permet de trier les séances dans la page patient de la plus récente à la plus ancienne (au lieu de l'inverse par défaut)
- Possibilité de choisir pour les patients entre le tri par Nom ou tri par Prénom
- Si on affiche le sidepanel, il sera automatiquement réouvert dès le démarrage au prochain programme.
- Dans la version 2025.1, des déconnexions pouvaient survenir en cours de programme, et arrêter leur exécution.
- Lors de l'arrêt du programme, un popup s'ouvre tant que la sauvegarde n'est pas terminée.