

BioStim Version 2026.1

BioPod



Cette nouvelle version est compatible avec le BioPod Full.

Par rapport au BioPod Link, le BioPod Full n'a pas besoin d'être connecté à un BioStim pour fonctionner.


C'est l'outil idéal pour faire du BFB en toute autonomie

Plus d'informations :

<https://www.mazetsante.fr/biopod/>

Pour se connecter, cliquer sur le logo Bluetooth. Une fois connecté :


- Un logo BioPod apparaît à côté du logo Bluetooth
- Les voies Biopod apparaissent dans la liste des voies disponibles

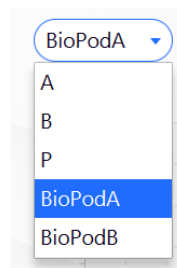

Programmes disponibles

Les programmes ne sont plus immédiatement disponibles lors de l'installation du logiciel. Pour les faire apparaître, il suffit de connecter un BioStim ou un Biopod Full. Les programmes compatibles avec vos appareils seront automatiquement débloqués


Modification des temps par défaut des programmes

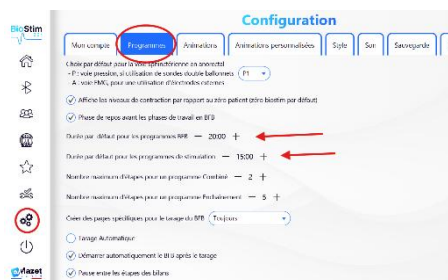

Le temps par défaut des programmes (20 minutes en BFB, et 15 minutes en stimulation), peut être ajusté sans modifier chaque programme individuellement.



BioMoov

4 options sont désormais disponibles pour choisir le comportement par défaut lorsqu'un BioMoov est connecté :

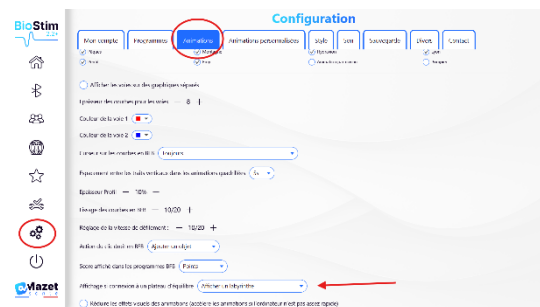


- Ne rien afficher
- Afficher un plateau neutre
- Afficher un plateau avec des exercices
- Afficher un labyrinthe
- Utiliser un goniomètre en voie 2

Dans les programmes « Cible », il est possible de choisir la taille de la cible à atteindre, pour moduler la difficulté :

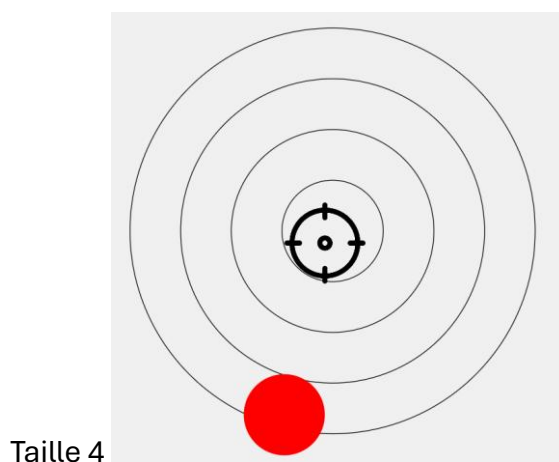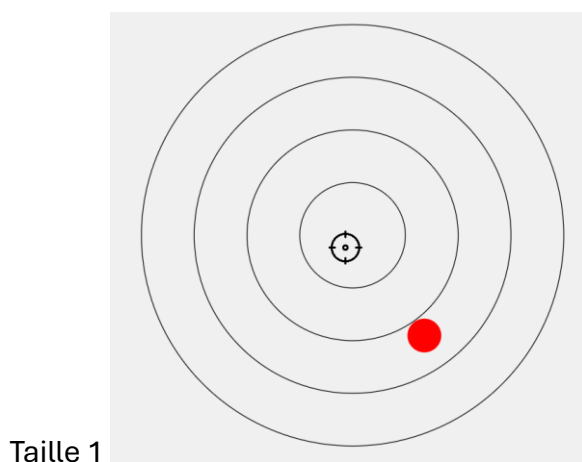


Nouvelle animation « Saint Valentin »

Une nouvelle animation Saint Valentin est disponible

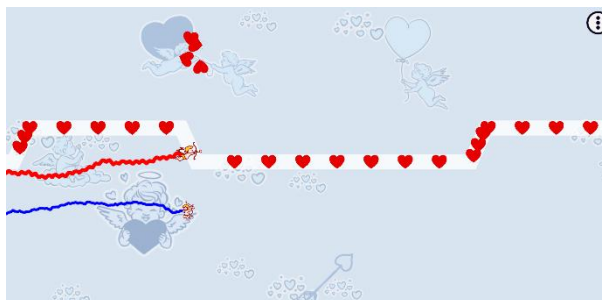


Choix du curseur

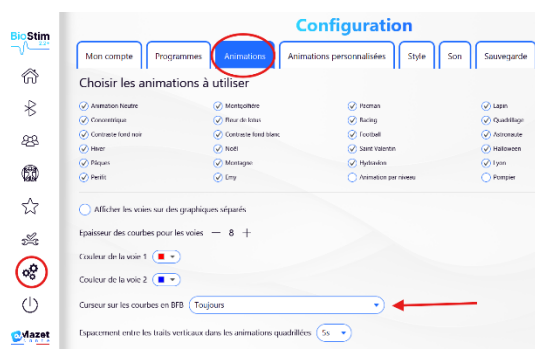


Il est possible de choisir le type de curseur que l'on souhaite pour les animations :


Aucun

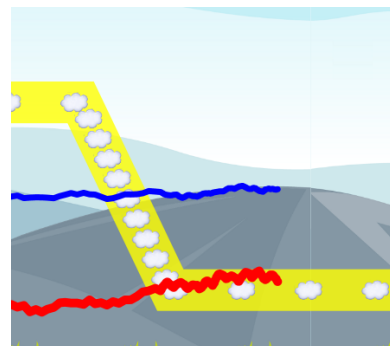

Triangles

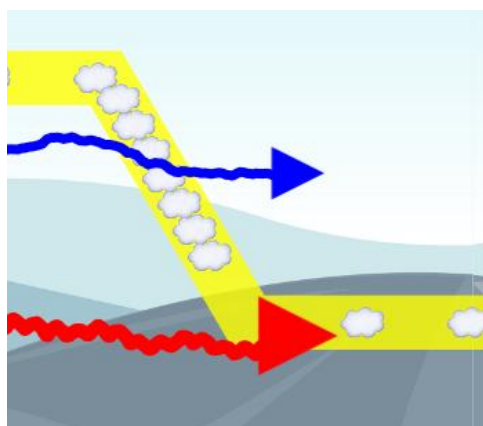


Curseurs de l'animation

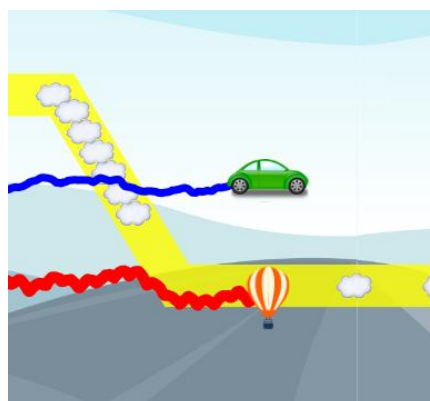

Objets aléatoires en décontraction

En BFB Décontraction, si on choisit de faire apparaître des objets aléatoires, ils apparaissent au niveau de décontraction maximum atteint par la patiente.

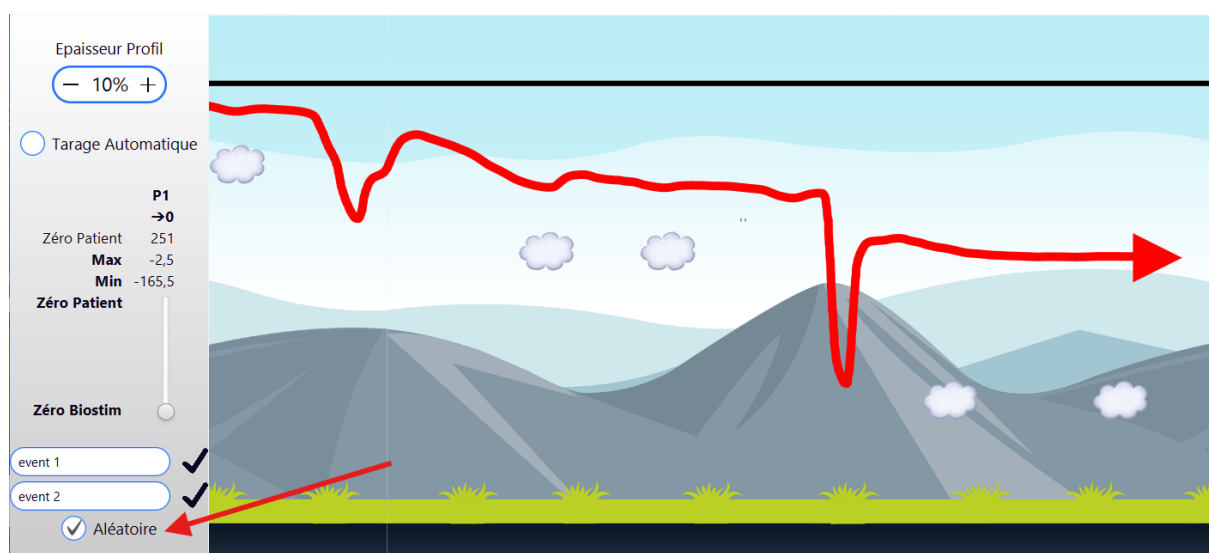

Divers et correction de bugs

- Ajout d'infobulles sur certains boutons, en particulier le bouton « Archiver » dans la liste des patients
- Corrigé : Les vidéos ne s'affichaient plus dans les planches anatomiques, suite à une modification des règles de Youtube
- Amélioration de la façon de compter les contractions dans la partie « fibres rapides » des bilans.

Mise à jour : **Attention !**

- La mise à jour pour les versions plus vieille que la 2025.2 se fait en 2 temps : mise à jour vers la version 2025.2, puis mise à jour vers 2026.1. Tout reste automatique, mais il faut faire 2 mises à jour à la suite
- Les PC avec Windows 7 et 8, ainsi que les Mac avec une version de MacOS avant la 12 ne sont pas pris en charge. Aucune mise à jour ne leur sera proposée.