

# *Manual de instalare rapidă*

## **1 Configurație minimă**

Aparatul se conectează la un computer cu cel puțin următoarele caracteristici:

- Windows 10 sau 11, sau MacOS Monterey (versiunea 12) sau mai recent
- Intel i3 pentru versiunile Windows
- Intel i5 sau cip M1 pentru versiunile MacOS
- 8 GB RAM
- Rezoluție recomandată: cel puțin 1600\*900
- Pentru utilizarea unui accesoriu Bluetooth (BioMoov, BlueBack, Emy sau Perifit), este necesar să aveți un PC cu **Windows 10 sau 11** echipat cu o placă Bluetooth sau MacOS

**Atenție**, software-ul Biostim **nu funcționează** cu:

- Windows 10S sau 11S
- PC-uri cu cip ARM
- Tabletele sau smartphone-urile (Android sau iOS)
- Chromebook

## **2 Software necesar**

Următoarele programe trebuie instalate pe computer:


- FTDI Driver (instalare prin CDM212xxx\_Setup.exe livrat împreună cu software-ul)
- Foxit PDF Reader

Dacă nu sunt deja prezente pe computer, fișierele de instalare sunt disponibile pe cheia USB în directorul „drivers”.

## 3 Instalare

### 3.1 Windows

Instalați programul pe desktop făcând dublu clic pe utilitarul **de instalare** (sau **installation.cmd**) din rădăcina cheii.

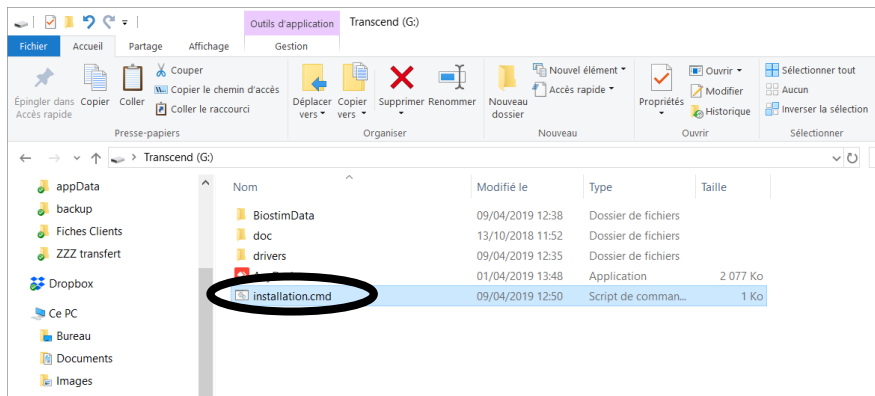

Această operațiune creează un director BiostimData în directorul utilizatorului (care va conține toate datele pacientului), precum și o comandă rapidă pe desktop.

### 3.2 Mac OS

Lansați programul Biostim\_Installer.pkg.

Această operațiune creează un director BiostimData în directorul utilizatorului (care va conține toate datele pacientului), precum și o comandă rapidă pe desktop.

## 4 Pornire

Puneți comutatorul de pornire-oprire situat în partea din spate a aparatului pe ON „1”.


Verificați dacă indicatorul luminos verde de pornire se aprinde pe partea din față a aparatului.

Lansați programul Biostim pe computer.



## 5 Verificarea conexiunii

Verificați dacă conexiunea este stabilă: butonul de pornire de culoare verde.

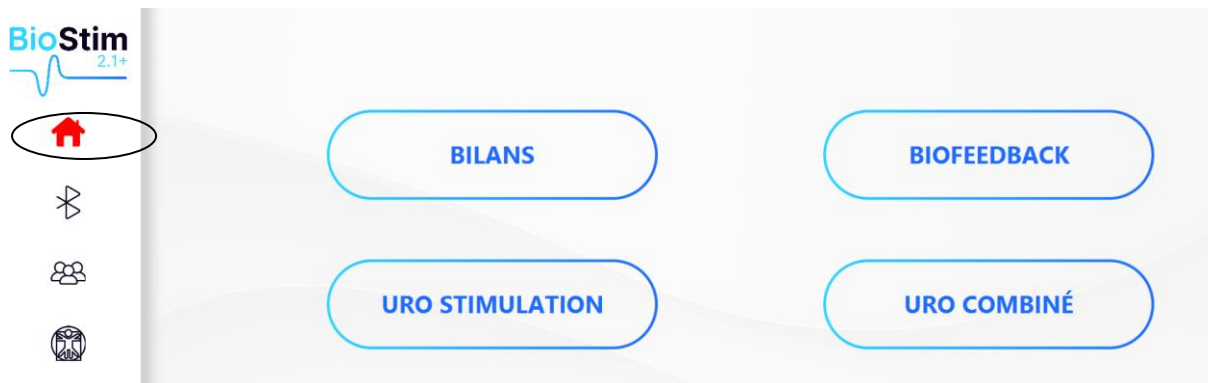

Butonul **roșu** indică o problemă de comunicare între computer și aparat. În acest caz, verificați următoarele:


- Modulul este sub tensiune, indicatorul verde de pe partea frontală este aprins.
- Cablul USB este conectat corect la dispozitiv și la computer.
- Driverul FTDI este instalat corect (CDM212xxx\_Setup.exe )

Butonul de pornire de culoare **portocalie** indică o problemă cu butonul de oprire de urgență:


- Verificați dacă butonul de oprire de urgență este conectat
- Dacă oprirea de urgență a fost activată, trebuie să reporniți BioStim (comutatorul de pornire/oprire din spatele aparatului)

## 6 În caz de problemă

Accesați fila Autotest. Dacă se detectează o problemă, aceasta va fi indicată cu roșu și va trebui să urmați sfaturile indicate. Dacă nu există conexiune la internet, logo-ul autotest va fi roșu.

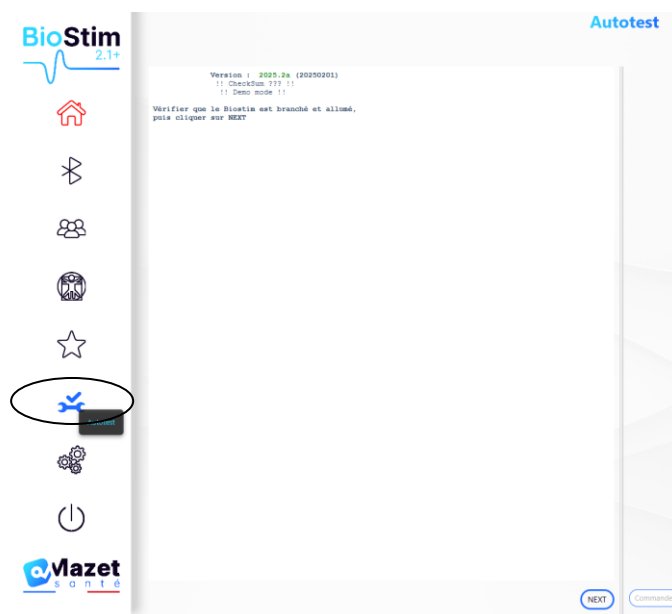

Dacă acest lucru nu este suficient, accesați fila Contact din pagina de configurare, care vă permite să raportați probleme sau să faceți sugestii prin e-mail.

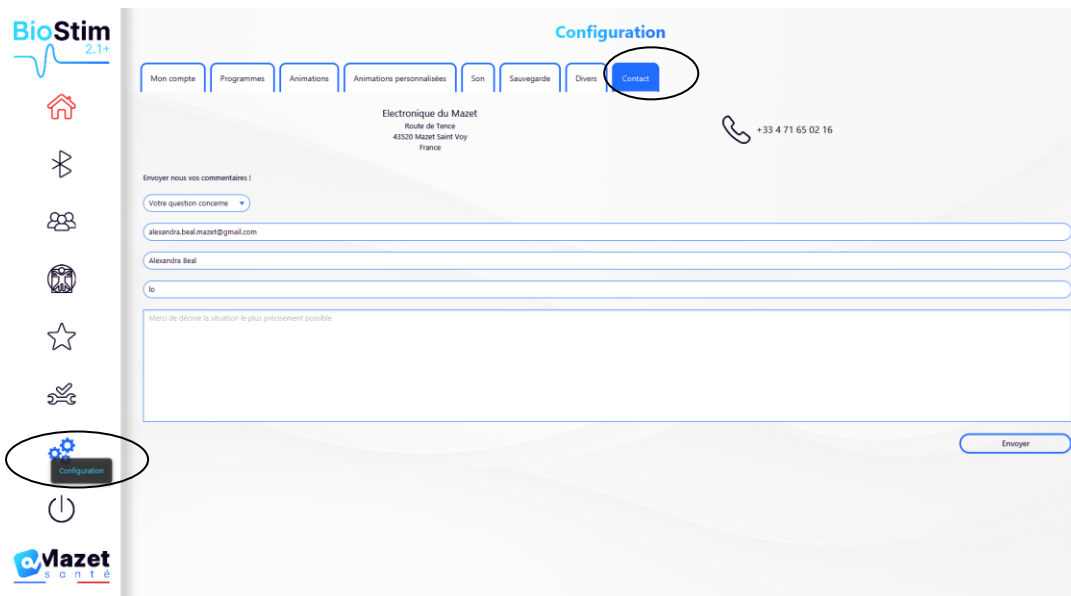

## 7 Control de la distanță

În timpul instalării, software-ul AnyDesk a fost instalat pe PC. Acesta permite controlul de la distanță al PC-ului pentru gestionarea serviciului post-vânzare.

O comandă rapidă este disponibilă pe



desktop

AnyDesk.exe

Pentru a permite unui tehnician să preia controlul, trebuie să îi comunicați numele de utilizator și parola care apar în fereastră după lansarea software-ului.

