

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES BLIFT +

Famille de traitement	Pathologies	Accessoires	Modes	Etapas	Tps/ Pression
CICATRICES	Cicatrices rétractiles	Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 500mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Lisser	5min/ 530mbar
	Cicatrices fibrosées	Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 400mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Lisser	5min/ 400mbar
	Cicatrices adhérentes	Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 500mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Lisser	5min/ 600mbar
	Césarienne	Tête d'aspiration R35	Continu	Vasculariser	5min/ 200mbar
		Palper-rouler	Continu	Lisser	10min/ 300mbar
DRAINAGE	Oedème	Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 530mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Drainer	10min/ 530mbar
	Membres supérieurs	Tête d'aspiration	Pulsé	Stimuler	5min/ 530mbar
		Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 530mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Drainer	10min/ 530mbar
	Membres inférieurs	Tête d'aspiration	Pulsé	Stimuler	5min/ 530mbar
		Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 530mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Drainer	10min/ 530mbar
BRULURES		Tête d'aspiration / Palper-rouler	Pulsé	Mobiliser	5min/ 150mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Assouplir	5min/ 200mbar
TENDINOPATHIE		Tête d'aspiration	Pulsé	Soulager	5min/ 300mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Mobiliser	5min/ 300mbar

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES BLIFT +

Famille de traitement	Pathologies	Accessoires	Modes	Etapes	Tps/ Pression
RACHIS	Cervicalgie	Tête d'aspiration R15 / R25	Continu	Vasculariser	5min/ 200mbar
		Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 200mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Assouplir	5min/ 200mbar
	Dorsalgie	Tête d'aspiration	Continu	Vasculariser	5min/ 500mbar
		Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 500mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Assouplir	5min/ 500mbar
	Lombalgie	Tête d'aspiration	Continu	Vasculariser	5min/ 200mbar
		Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 200mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Assouplir	5min/ 200mbar
	Sciatalgie	Tête d'aspiration	Continu	Vasculariser	5min/ 200mbar
		Tête d'aspiration	Pulsé	Mobiliser	5min/ 200mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Assouplir	5min/ 200mbar
PEAUX IRRADIEES		Tête d'aspiration	Continu	Mobiliser	5min/ 200mbar
		Tête d'aspiration	Continu	Assouplir	5min/ 300mbar



Electronique du Mazet
ZA Route de Tence, 43520 le Mazet-Saint-Voy