

PROGRAMMES		NOM + N° MODÈLES	TEMPS / PRESSION	N° PGM	IPRESS 6+ 10+	
JAMBES	Lymphœdème 	Thérapie décongestive	Appel résorption large - N°7 (N°9 pour appareil 6 cellules)	25min / 50mmHg	1111	 
			Drainage péristaltique - N°3	25min / 30mmHg	1112	 
	Récidive LO	Résorption détente - N°4	25min / 30mmHg	112	 	
	LO persistant	Fragmentation - N°10	50min / 50mmHg	113	 	
	LO transitoire / Prévention LO	Appel résorption large - N°7 (N°9 pour appareil 6 cellules)	25min / 50mmHg	114	 	
	Bien-être	Élimination des toxines	Drainage péristaltique - N°3	30min / 40mmHg	121	 
		Détente	Résorption détente - N°4	25min / 30mmHg	122	 
		Récupération musculaire		30min / 50mmHg	123	 
EFFLEURAGE	Résorption	Récupération musculaire intense	Drainage péristaltique - N°3	25min / 30mmHg	124	 
		Pression faible		25min / 30mmHg	131	 
		Pression renforcée		20min / 35mmHg	132	 
		Pression progressive	Résorption - N°1	20min / 40mmHg	133	 
		Pression élevée		20min / 45mmHg	134	 
	Effleurage	Effleurage simple	Effleurage simple - N°2		141	 
		Effleurage double (20/40)		20min / 40mmHg	142	 
		Effleurage double (20/30)	Effleurage double - N°6	20min / 30mmHg	143	 
BRAS	Lymphœdème 	Effleurage large	Effleurage large - N°5	20min / 40mmHg	144	 
		Thérapie décongestive	Appel résorption - N°8 (N°11 pour appareil 6 cellules)	25min / 50mmHg	2111	 
		LO persistant	Résorption - N°1	25min / 30mmHg	2112	 
		LO transitoire	Fragmentation - N°10	50min / 50mmHg	212	 
	Bien-être	Détente	Appel résorption - N°8	25min / 50mmHg	213	 
		Récupération musculaire	Résorption détente - N°4		221	 
		Récupération musculaire intense	Résorption détente - N°4	25min / 30mmHg	222	 
	Résorption	Pression progressive	Drainage péristaltique - N°3		223	 
ABDOMEN	Bien-être	Détente	Résorption détente - N°4	30min / 35mmHg	311	 
		Massage stimulant		25min / 40mmHg	312	 
	Paresse intestinale		Résorption - N°1	25min / 50mmHg	32	 



Les programmes affichant le logo CE répondent aux exigences du règlement MDR 2017/745 et ont été évalués par le GMED pour une utilisation à des fins médicales.

Les programmes sans logo CE sont destinés à un usage non médical (bien-être, récupération, confort) et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation dans le cadre du marquage CE.